

Mode d'emploi **Electronique**




THERMOMÈTRES DIGITAL+®, DIGITALIX-28®, DIGIFLEX®


Ils fonctionnent par mesurage d'une température maximale après qu'un état d'équilibre ait été atteint, et l'indicateur traite alors le signal de sortie pour afficher la valeur de la température mesurée.

1

MISE EN MARCHÉ > Appuyer 1 fois sur la touche Marche/Arrêt.

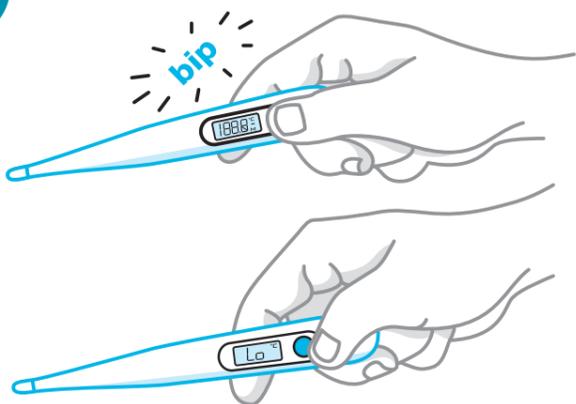

L'écran affiche :

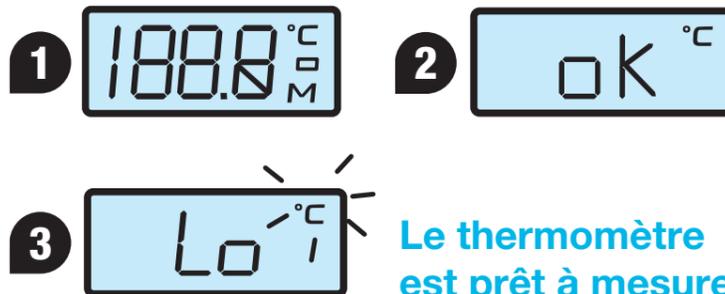


Le thermomètre est prêt à mesurer



NE PAS UTILISER !

Si l'écran affiche

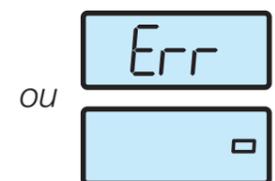


2

PRISE DE TEMPÉRATURE >


Polyvalence des sites :
(rectal, buccal, axillaire, inguinal).

Durant la prise, le C° clignote tant que la température croît.

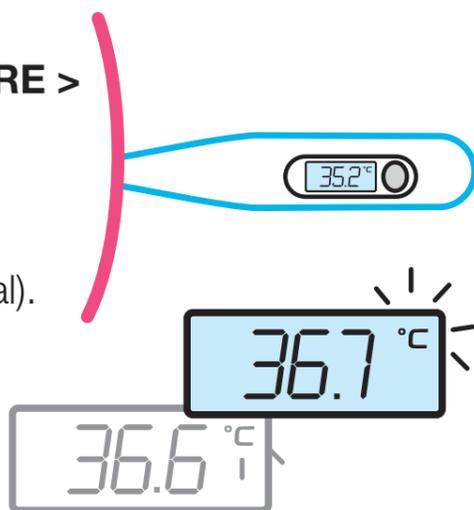

3

LECTURE > Plusieurs bips sonores signalent la fin de la mesure et le C° cesse de clignoter.

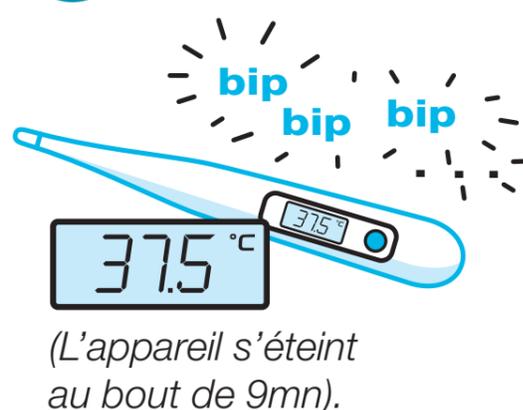

(L'appareil s'éteint au bout de 9mn).




Température **inférieure** à l'étendue de mesure.



Température **supérieure** à l'étendue de mesure.

4

CONSULTATION DE LA MÉMOIRE > Appuyer sur la touche Marche/Arrêt sans la relâcher.

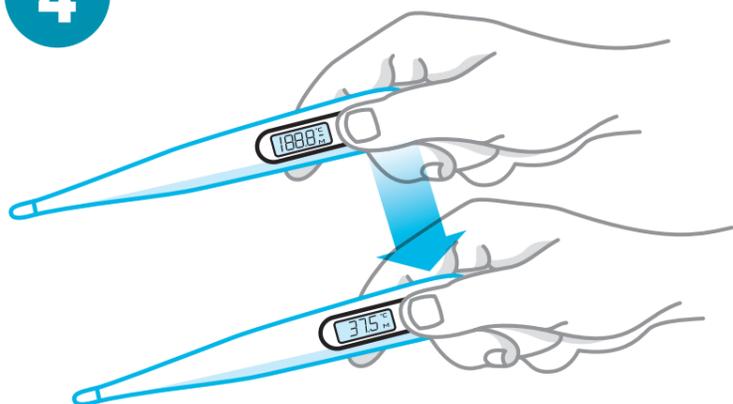

L'écran affiche d'abord.



Puis l'écran affiche la dernière température mesurée.



PRÉCAUTIONS !

Pour toute autre information particulière ou changement de la pile, se reporter à la notice détaillée livrée dans son emballage d'origine ou au service pharmacie.