

Mode d'emploi


Sites de température

USAGE RECTAL

Pour la prise rectale, l'utilisation d'un étui jetable est conseillée (voir Digisept®). Sinon lubrifier la sonde avec de la vaseline. Insérer doucement l'extrémité de la sonde à 1,5 cm au maximum dans le rectum. ARRÊTER immédiatement en cas de résistance quelconque. Le capteur de l'appareil se situe à l'extrémité de la sonde, il n'est donc pas nécessaire d'insérer le thermomètre profondément dans le rectum. Température moyenne rectale : 37 °C (pas de correction). Durée approximative de la mesure : 10 à 20 sec. pour le Digiflex® et 30 à 60 sec. pour le Digital+® et le Digitalix-28®.


USAGE BUCCAL

Placer la sonde sous la langue, à droite ou à gauche de la base de la langue en assurant un bon contact. Bien refermer la bouche et respirer par le nez. Ne rien boire ni manger avant usage. Température moyenne buccale : 36.6 °C (ajouter 0.4 °C). Durée approximative de la mesure : 20 à 30 sec. pour le Digiflex® et 45 à 90 sec. pour le Digital+® et le Digitalix-28®.

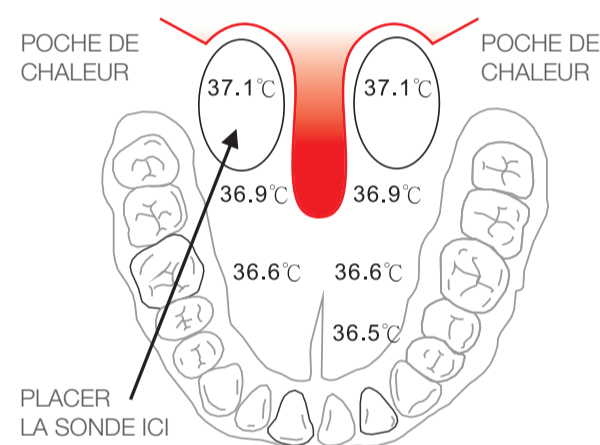

USAGE AXILLAIRE

Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche. Caler la tête de la sonde bien au milieu du creux axillaire et plaquer le bras contre le thorax. Température moyenne axillaire : 36.1 °C (ajouter 0.9 °C ; idem en inguinal). Durée approximative de la mesure : 30 à 60 sec. pour le Digiflex® et 60 à 120 sec. pour le Digital+® et le Digitalix-28®.

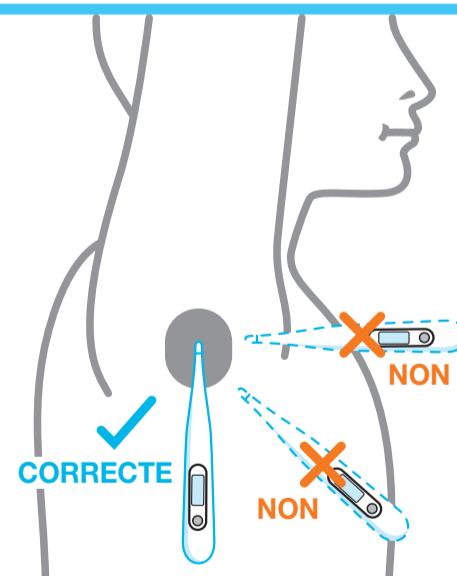

PRÉCAUTIONS !

Les enfants doivent être assistés par un adulte durant toute la prise de température. Après utilisation et désinfection, le thermomètre doit être stocké en sécurité en dehors de la portée des jeunes enfants. Pour toute autre information particulière ou changement de la pile, se reporter à la notice détaillée livrée dans son emballage d'origine ou au service pharmacie.